



MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL



FE2111

CONFORTÁVEL E FÁCIL DE RESPIRAR

MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL


Utilizada para cobrir boca, nariz e queixo, a máscara facial descartável BYD auxilia na proteção contra a transferência de microorganismos, fluídos corporais e material particulado.

Parâmetros da máscara facial descartável BYD

Nome	Parâmetro
Nome do produto	Máscara facial descartável
Material	Tecido não tecido de polipropileno; tecido não tecido com filtro de polipropileno; clipe de nariz de metal com revestimento plástico; elásticos de orelha de elastano, poliéster e/ou nylon.
Modelo do produto	FE2111
Tamanho	175 mmx95 mm
Data de validade	2 anos após a data de fabricação
Especificação de embalagem	50 unidades/caixa
Armazenamento	Armazene em local seco e arejado e em temperatura ambiente.



Apresentação do produto

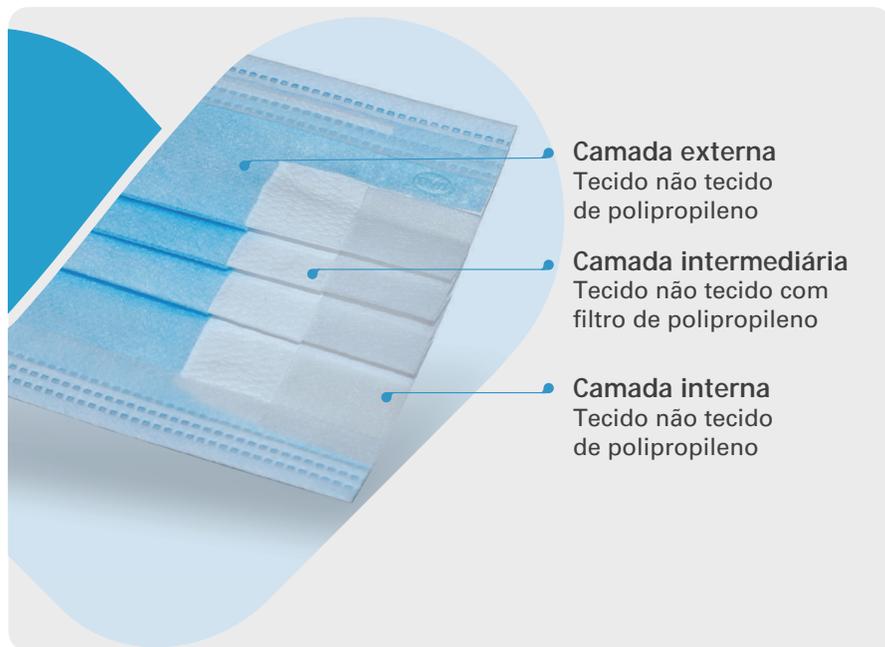

Instruções de Uso



1. Segure a máscara pelos elásticos das orelhas com o lado colorido voltado para fora e o clipe nasal para cima e coloque um elástico em volta de cada orelha.




2. Ajuste o clipe plástico do nariz de acordo com a forma do nariz para impedir a entrada de ar não filtrado.



3. Puxe a máscara sob o queixo para garantir a máxima vedação.

Materiais

Camada Interna	Tecido não tecido de polipropileno.
Camada Intermediária	Tecido não tecido com filtro de polipropileno.
Camada Externa	Tecido não tecido de polipropileno.
Elástico de Orelha	Elastano, poliéster e/ou nylon.
Clipe de Nariz	Clipe de metal com revestimento plástico.

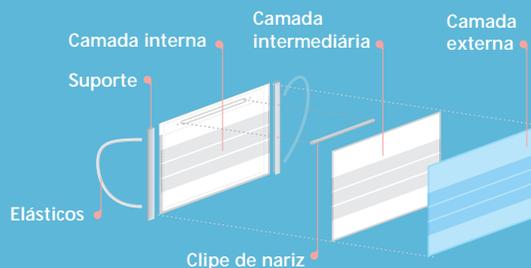

ATENÇÃO

1. A máscara não elimina o risco de contrair qualquer doença ou infecção.
2. A utilização inadequada deste produto pode resultar em danos à saúde ou até morte.
3. Somente para uso único, destrua e descarte de acordo com os regulamentos após o uso.
4. Utilize apenas dentro do período de validade.
5. NÃO utilize se a embalagem estiver danificada.
6. Consulte as instruções de uso antes de usar.
7. Uso adulto.
8. Utilize este produto imediatamente após a abertura da embalagem. Não toque na parte interna da máscara.
9. Não lavável.
10. Caso sinta dificuldade de respirar ou a máscara for danificada ou suja, deixe a área contaminada e substitua a máscara por uma nova.

Todas as informações apresentadas neste documento são baseadas nos dados mais recentes disponíveis no momento da impressão.
A BYD se reserva o direito de fazer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio.

Produto importado.

Fábrica BYD do Brasil
Avenida Antonio Buscato, 230 - Campinas / São Paulo
Brasil | CEP 13069-119 | Tel: +55 19 3514-2550

(11) 9 4232 4368
(11) 9 7288 9790
vendas@byd.com
WWW.BYD.COM/BR

